

Quickguide

MA 25 audiometer

Hounisenvarenummer: 0014.0100

Anvendelsesområde

MA 25 er designet til screening og identifikation af høretab og eventuelle faktorer, der påvirker hørelsen hos alle patienter over 3 år, som kan respondere rationelt på signaler fra audiometeret. Audiometeret skal kun anvendes af uddannet personale.



Læs Manualen, der følger produktet før brug af MA 25 audiometeret. Denne quickguide kan ikke stå i stedet for den oprindelige manual.

Forberedelse/placering

1. Temperatur 15 °C til 35 °C. Hvis Audiometeret har været kølet til under stuetemperatur, skal det akklimatiseres før brug.
2. Lufttryk 98 kPa til 104 kPa. Må ikke anvendes over 2000 meter.
3. Luftfugtighed 30 % - 90 %.
4. Lyde i omgivelserne må ikke forstyrre under undersøgelsen.
5. Sørg for at der ikke er elektromagnetiske apparater (fx mobiltelefoner, mikroovne osv.) i nærheden, da de kan forstyrre signalerne.
6. Patienten skal sidde mindst 1 m fra audiometeret.
7. Giv instrukser om variationer i lydtoner og -styrke.
8. Placer høretelefonerne, **Rød / højre øre** og **blå / venstre øre**, undgå forstyrrende elementer fx hår.

Indstilling og start

1. Apparatet kører på 3 AA batterier.
2. Alle kabler og tilbehør skal være tilsluttet apparatet før det tændes.
3. **Tænd** → tryk på Tone Switch.
4. opvarmning tager ca. 1 min., så vær tålmodig.
5. **Sluk** → hold Hearing Level dB og Frequency Hz inde samtidig et par sekunder, eller hiv stikket ud.
6. Skift mellem lyd i højre og venstre øre. **F1= højre, F2= venstre.**
7. Skift mellem **pulserende tone eller ej. F3 on/off.**
8. **Menu for funktioner** → hold F1 og F4 inde på samme tid i 2-3 sek.

Rengøring

1. Rengøring anbefales mellem hver patient.
2. Sluk altid apparatet før rengøring.
3. Apparatets overflader kan rengøres eller desinficeres med fugtig opvredet serviet. Vigtigt at apparatet ikke bliver vådt og især at der ikke kommer væske i nogen åbninger.
4. Hovedtelefonerne kan ligeledes tørres over med en fugtig desinfektionsserviet eller opvredet fnugfriklud.



#	Name(s) / Function (s)	Description
1	Tone Switch	Presenter mode: Press to present the signal. A tone presentation signal (i.e. ♪) will display on the screen. Interrupter mode: Press to stop the signal being presented.
2	Hearing Level dB	Dial to select hearing level of presented tone between -10 dB HL and 100 dB HL.
3	Frequency Hz	Dial to select frequency of presented tone.
4	Function Keys F1-F4	See section 5.4 for more details.